



ОБОВ'ЯЗКОВО ДЕЗІНФІКУЙТЕ МІСЦЕ ПЕРЕРІЗАННЯ ПУПОВИНИ!


(ОДИН РАЗ 5% РОЗЧИНОМ ЙОДУ, А ПОТІМ ДВІЧІ 70% ЕТИЛОВИМ СПИРТОМ)



ЗБІР ТКАНИНИ ПУПОВИНИ


**ЗАБІР ТКАНИНИ ПУПОВИНИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ПІСЛЯ ЗБОРУ ПУПОВИННОЇ КРОВІ!**

1

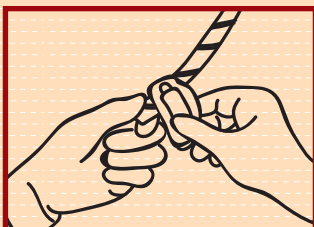


Місце передбачуваного відрізання фрагмента пуповини необхідно продезінфікувати.

2

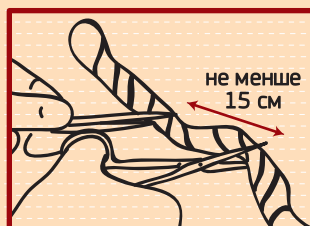


Відрізати фрагмент довжиною не менше 15 см.
Очистити його стерильною серветкою.

3

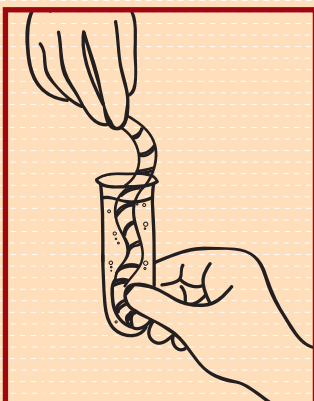

Відкрити стерильну пробірку з транспортним середовищем і вкласти фрагмент пуповини.


4

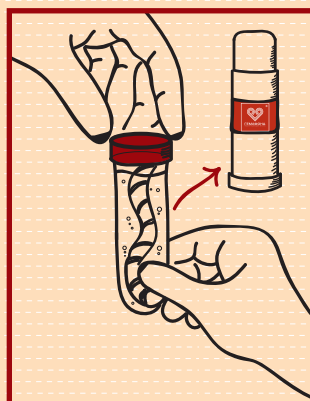

Щільно закрити пробірку і помістити її в термостійку ємність.

Будь ласка, не забудьте промаркувати пробірку з фрагментом пуповини

5

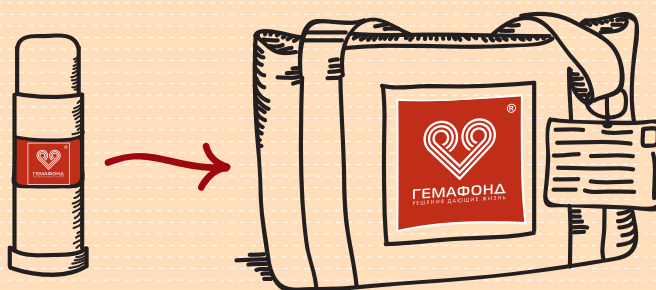

Термостійку ємність помістити у контейнер Сімейного банку пуповинної крові «ГЕМАФОНД».

**ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВІДОМТЕ ПРО ЗБІР БІОМАТЕРІАЛУ «ГЕМАФОНДУ» ЗА ТЕЛ.:
У КИЄВІ (044)496-09-26 В ІНШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ (067)214-13-29
(098)496-09-26**

АБО З'ВЯЖІТЬСЯ З ОФІЙНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ «ГЕМАФОНДУ»