



Інструкція з взяття венозної крові з використанням моноветтів (ЕДТА)

Шприцева (або аспіраційна) методика


- 1) одягти медичні гумові рукавички;
- 2) накласти джгут вище місця венопункції;
- 3) вийняти голку зі стерильної упаковки (рис.1.1);
- 4) під'єднати голку до моноветту обертальним рухом (рис. 1.2);
- 5) обробити місце венопункції спиртовою серветкою;
- 6) зняти захисний ковпачок з голки (рис. 1.3);

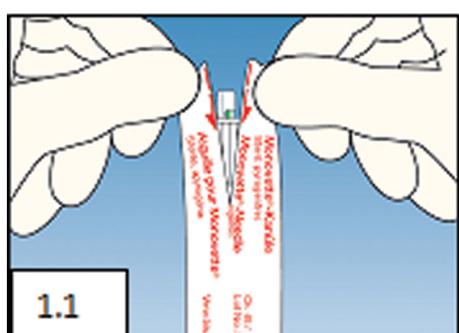

1.1

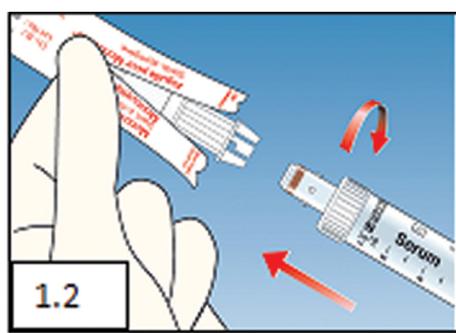


1.2

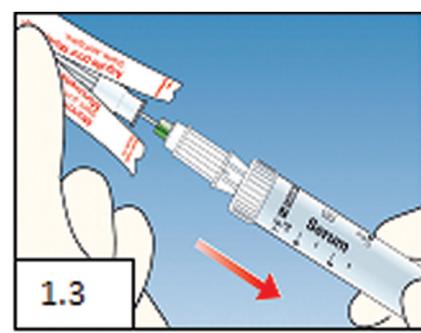


1.3

- 7) провести венопункцію;
- 8) зняти джгут;
- 9) набрати кров у моноветт до мітки, поступово відтягуючи поршень моноветта, поки не буде відчутний клік (рис. 1.4);
- 10) від'єднати моноветт від голки (рис. 1.5);

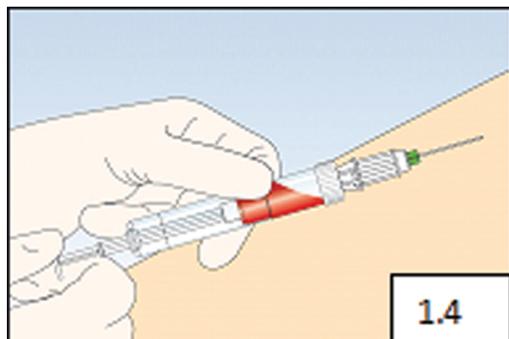


1.4

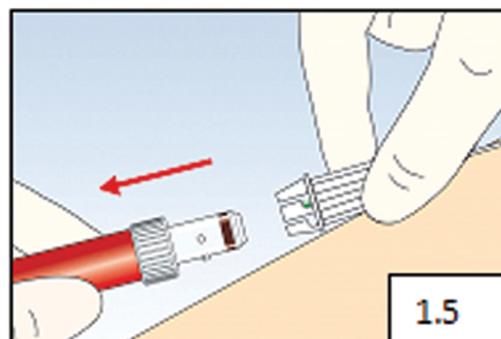

1.5

- 11) обережно, не допускаючи піноутворення, перевернути декілька разів моноветт з кров'ю для ретельного перемішування крові з антикоагулянтом ЕДТА;
- 12) закінчити венопункцію (витягти голку з вени, до місця венопункції прикласти спиртову серветку);
- 13) відломити стержень моноветта біля його основи (рис. 1.6).
- 14) провести маркування моноветта з кров'ю, вказавши ПІБ породіллі та дату взяття крові.

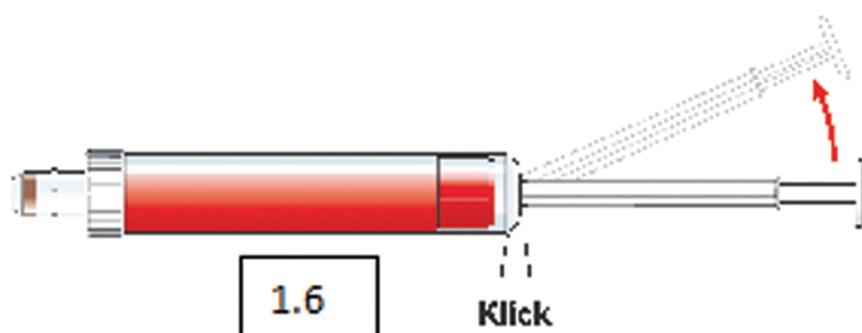

1.6

Klick